


Партура (Partura®)
Кровать для приёма родов
производства фирмы Schmitz
Безопасно и удобно для
родовспоможения

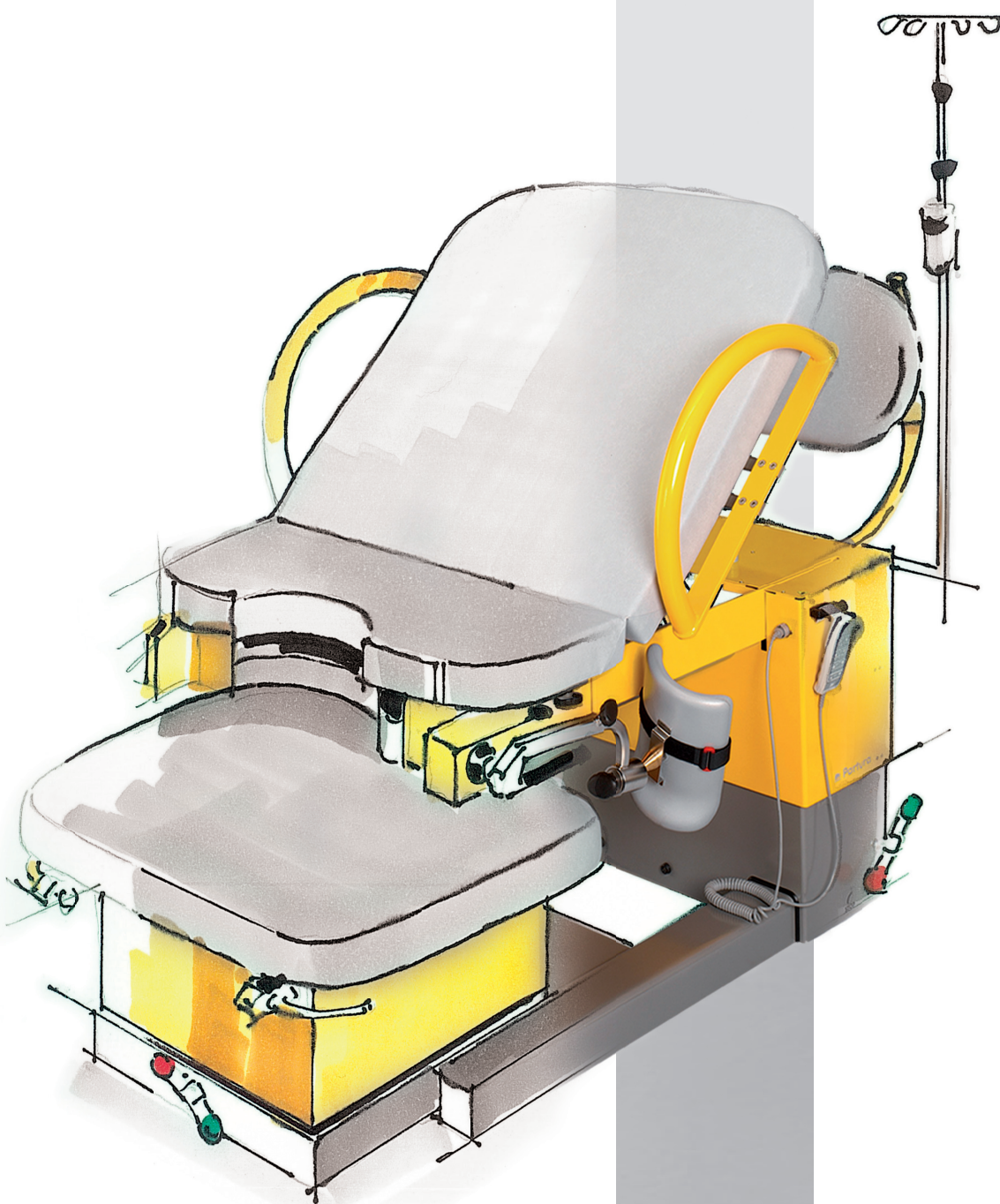

SCHMITZ

A Sense of Confidence



Партура (Partura®) Новая концепция приема родов, сочетающая комфорт, гибкость и безопасность



Концепция: Карин Бергхаммер/Ирис Подгоршек
Дизайн: podpod Design

Стол для приема родов сконструирован таким образом, чтобы будущая мама имела как можно большую свободу движений, во время первого периода родов и периода выхода плода. Он может переставляться через пульт управления в разнообразные положения.

Сначала будущая мама может самостоятельно регулировать стол для своего удобства. Приятная мягкая поверхность стола достаточно велика, что позволяет проводить роды в присутствии партнёра, а акушерке оказывать активную помощь

роженице. Акушерка и доктор также могут использовать секцию для ног в качестве сиденья.

В настоящее время при оказании высококачественной врачебной помощи большое внимание уделяется удовлетворению запросов пациента.

Стол для приема родов, производимый компанией ШМИТЦ, удовлетворяет всем требованиям: как медицинских специалистов, так и пациентов. Он сочетает привлекательный дизайн и функциональность с удобством для будущей матери и

оптимальными условиями для работы акушерской бригады.

Плотное, гладкое покрытие и участки обивки легко мыть и дезинфицировать. При необходимости всего в несколько шагов стол может быть переставлен в раз нообразные положения, для проведения самых различных процедур в зависимости от медицинских показаний.

Стол для приема родов нового поколения — для безопасного и удобного приема родов.

Период раскрытия, кровать в самом низком горизонтальном положении, для переменных движения/отдыха позволяет легко лечь и встать с кресла.



Период изгнания в вертикальном положении при помощи партнера. Женщина может облокотиться на партнера, телесный контакт.

Роды в классической позиции.



Роды в глубоком приседе. Оптимальный угол родов, максимальное кифозирование, промежность освобождена.

Роды с приподнятым тазом при дистонии лопатки, оперативном вмешательстве или мануальной помощи.



Роды в глубоком приседе с партнером, мужчина может приподнять свою жену, при проходе головы.

Период раскрытия и/или переходный период в колено-локтевой позиции при конечных потугах несмотря на недораскрытие шейки матки и при внутриматочной асфиксии.



Оперативные роды, экстракция при помощи колокола или щипцов, мануальная помощь при позиции ребёнка попой вперёд., послеродовое положение для мануального удаления плаценты и ухода за промежностью.

Роды в колено-локтевом положении у многорожавших женщин с имевшим место разрывом для освобождения промежности и при особо крупных детях



Кесарево сечение в родильной палате при акутной индикации.

Послеродовый период. После родов в колено-локтевом положении женщина не должна поворачиваться вокруг себя, а может просто откинуться назад.



Шоковое положение при выходе шнура пуповины перед ребёнком или коллапсе кровообращения.

Период изгнания в вертикальном положении, удобное сидячее положение. Мануальная помощь возможна при позиции ребёнка попой вперёд.



Высокое расположение ног для отдыха.

Партура®

Шмитц кровать для родовспоможения

Надежное и удобное решение для родов

Партура Кровать для родов 140.100

- Ножная часть может быть отделена от основной части — лучший доступ для акушерки и врача, можно использовать ножную часть как сиденье или полочку.
- Совместное и раздельное передвижение вверх и вниз от электродвигателя ножной и основной частей.
- Простая очистка и дезинфекция благодаря закрытым и гладким формам дизайна, снимающийся матрас польстера.
- Оборудована колёсиками для передвижения, с центральным блокиратором колёс.
- Выбор 24 различных цветов на Ваш вкус.
- Разнообразные положения кровати гарантируют высокую стабильность и предлагают много мест для различных поз роженицы, в том числе и для родов в присутствии партнёра.
- Функции переставления кровати управляются с двух ручных пультов управления.
- Мягкие и плавные движения кровати
- Мультифункциональная спинка, крепящаяся как к ножной, так и к основным частям.
- Держатель ноги по Гёпелю с круглым шарниром для быстрой установки в рабочую позицию.
- Встроенные аккумуляторы для уверенной бесперебойной работы в случае проблемы с электроснабжением больницы.




Покрытие металла:
1. Цвет сигнально-жёлтый RAL 1003
2. Цвет серый алюминий RAL 9007



- 1 Держатели ног быстро могут укреплены в рабочем положении или спрятаны в положение хранения.
- 2 Спинка крепится и на ножную часть.
- 3 Позиция для хранения опор для рук на основной части со стороны головы в случае их неиспользования.
- 4 Главный выключатель, выравниватель потенциалов, индикатор зарядки аккумулятора и розетка для источника холодного света.
- 5 Инфузионная стойка крепящаяся со стороны головы или справа или слева.
- 6 Ручки для лёгкого передвижения ножной части кровати. Рычаг для перестановки ножной части.
- 7 Два пульта ручного управления с кабелем справа и слева от основной части.

Аксессуары:

- 8 **Подушка 104.6010.0**
Для поддержки спины.
- Простыня крепящаяся 104.6020.0**
Для двухсекционного полстера, белая, устойчива к температуром до 95 °С.
- 9 **Ручка для держания 104.6030.0**
Для стабилизации плечевого пояса, из стальной трубы, с покраской методом порошкового напыления и высоко температурной обработки, переставляется по высоте и наклону, с двумя поворачивающимися зажимами из хром-никелевой стали, монтируется на боковых шинах.
- 10 **Боковые ограничители (пара) 104.6040.0**
съемные, из стальных труб, покраска технологией порошкового напыления и высокотемпературной обработки, крепежи из хром-никелевой стали, монтируются с боковых сторон спинной секции.
- 11 **Поддон 104.6050.0**
из хром-никелевой стали
355 x 325 x 100 мм
(длина x ширина x глубина)
- 12 **Упоры для ног 104.6060.0**
Крепления из хром-никелевой стали, упоры из специального искусственного материала, серые.

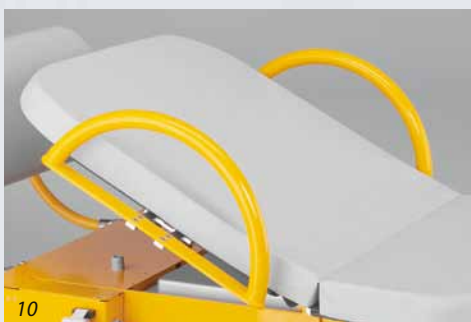

Партура®

Шмитц кровать для родовспоможения

Надежное и удобное решение для родов



Серийное исполнение

Кровать для родов модель 140.100 основная часть с сиденьем, спинкой и ножной частью, перемещающейся на роликах, имеет центральный стопор.

Сиденье с вырезом, радиус 150 мм.

Матрас polyester из двух частей — основная и ножная части на высокоэластичной уплотненной основе из специального материала, влагонепроницаем, не скользит по поверхности основания.

Рамы каркаса из металла и все метал личные части могут быть выполнены в разных цветах по цветовой гамме Шмитц по технологии порошкового напыления. Матрас polyester и polyester спинки в цвете гранитно серый 89 по цветовой гамме Шмитц.

1 простыня самодержающаяся, белая, устойчивая к кипячению до 95 °С.

Ножная часть может использоваться отдельно от основной части. Ножная часть может быть смещена под основную, имеет 4 фиксированные позиции.

Спинка может устанавливаться у головной и ножной части, обтянута гранитно серым специальным материалом цвет 89 по цветовой гамме Шмитц. Два держателя для ног по Гёпелю, штанга и шарниры из хром-никелевой стали 18/10, светло-серая polyester подушки, переставляется по высоте. Два поворотных шарнира для установки держателей ног по Гёпелю. Быстро переставляются в рабочее положение.

Две ручки для упора рук из специального материала, в светло сером цвете, штанги и крепежи из хром-никелевой стали 18/10, вставляются по бокам.

Штатив инфузионный с 4-мя крючками, хром-никелевая сталь 18/10, для крепления у головы и у ручек, переставляется по высоте. Опора спинки в районе выреза сиденья, полукруглая, светло-серый специальный материал обивки, для рождения в глубоком приседе.

Два дистанционных пульта со спиральным кабелем (дополнительно можно заказать инфракрасные пульта дистанционного управления). Перестановка по высоте рабочей поверхности лежания пациента.

- Изменение положения рабочей поверхности главной части по высоте
- Изменение положения спинной секции
- Изменение положения тазовой секции
- Наклон рабочей поверхности (шоковое положение)
- Изменение высоты ножной части (при соединении её с главной частью)

Надёжность при прекращении снабжения током — встроена аварийная система автономного энергопитания, контрольные диоды аккумуляторов расположены со стороны головы в главной части.

Технические данные

Перестановка по высоте основной части от 645 до 925 мм.

Перестановка по высоте ножной секции от 460 до 925 мм (возможна только при присоединении к основной части).

Внешние размеры кровати для родов с установленной спинкой 2330 x 1015 мм (длина x ширина).

Поверхность для лежания 1950 x 950 мм (длина x ширина).

Длина матраса спинки 890 мм

Длина матраса тазовой секции 350 мм

Длина матраса ножной секции 695 мм

Толщина матраса 80 мм

Угол наклона основной секции (шоковое положение) 0-12°

Угол наклона спинной секции 0-78°

Угол наклона тазовой секции 0-27°

Номинальная допустимая нагрузка на основную часть 220 кг

Номинальная допустимая нагрузка на ножную часть 135 кг

Вес ножной части 110 кг

Вес главной части 265 кг

Общий вес 375 кг

Напряжение в сети 230 В AC

Частота 50 Гц

Мощность макс. 0,76 КВт

Класс защиты I/В



Цвета

Полиester из двух частей для основной и ножной части, гранитно-серый 89. Спинка гранитно-серая 89. Полиester держателей ног, опоры для рук, и опора для спины. Специальный искусственный материал свет ло-серый. Стальные элементы в цветах по цветовой карте Шмитц, технология напыления и вжаривания краски.

Защитные покрытия металла

	Серо-белый RAL 9002
	Чисто-белый RAL 9010
	Алебастровый серый RAL 0007500*
	Светло-серый RAL 7035
	Антрацитовый серый RAL 7016
	Насыщенный черный RAL 9005
	Белый алюминий RAL 9006
	Серый алюминий RAL 9007
	Желтый RAL 1009050*
	Сигнально-желтый RAL 1003
	Желто-оранжевый RAL 0506060*
	Цвет слоновой кости RAL 1015
	Песочно-бежевый RAL 0607030*
	Медно-коричневый RAL 8004
	Античный розовый RAL 3014
	Сиреневый RAL 3108010*
	Зеленый RAL 1808010*
	Зеленый — ёлочный RAL 1703020*
	Лимонно-зеленый RAL 1008060*
	Зелёной листы RAL 1206050*
	Бирюзовый RAL 5018
	Бело-голубой RAL 2408015*
	Светло-голубой RAL 2606030*
	Сапфировый голубой RAL 5003

*Полутона RAL

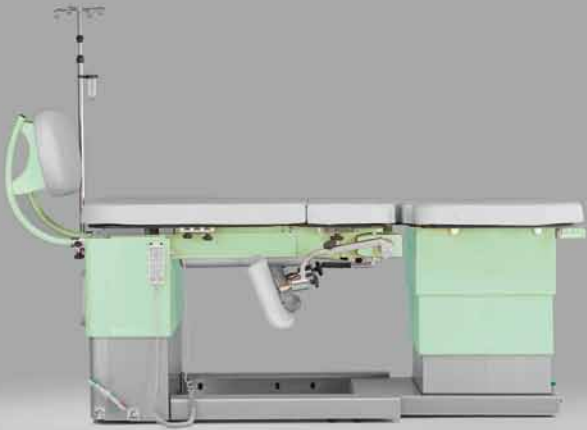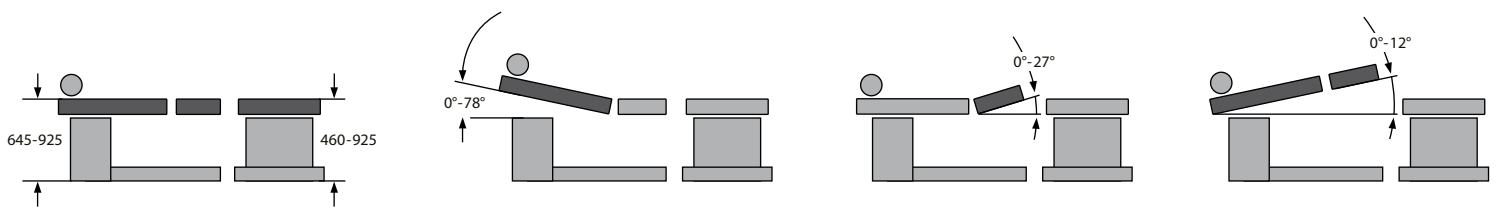



**Шмиц унд Зёне
ГмбХ унд Ко. КГ**


Д 58734 Викаде (Рур),
Почтовый ящик 1461
Д 58739 Викаде (Рур),
Цум Остенфельд 29
Телефон +49 2377 84 0
Телефакс +49 2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de
export@schmitz-soehne.de

Горячая линия технической
поддержки:
Телефон +49 2377 84 549
Телефакс +49 2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Все продукты, обозначенные
значком, вместе с нашими
принадлежностями
аксессуарами отвечают
требованиям закона о
медицинских изделиях (MPG)
и нормам ЕС 93/42/EWG.
Медицинские изделия класса 1.



Продукты могут быть использованы
только по назначению.
Пожалуйста, внимательно изучайте
инструкции по эксплуатации.

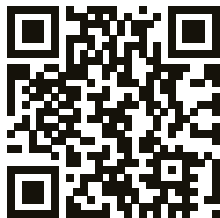

[f /schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)

**Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG**

P. O. Box 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Germany (postal address)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Germany (visiting address)
Phone +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Technical service, hotline:
Phone +49 (0)2377 84 549
Fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

**Офис продаж по России,
СНГ, и Восточной Европе**

Шмиц унд Зёне ГмбХ унд Ко. КГ
Сергей Косолапов
Борнаишештрассе 180
Д 04279 Лейпциг
Телефон +49 3 41 3 37 80 34
Телефакс +49 3 41 3 37 80 35
Мобильный +49 1 52 0 90 77 05 8
kosolapov@schmitz-soehne.de

Russia and Eastern Europe


Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Sergey Kosolapov
Bornaische Str. 180
04279 Leipzig
Germany
Phone +49 (0) 3 41 3 37 80 34
Fax +49 (0) 3 41 3 37 80 35
Mobile +49 (0) 1 52 0 90 77 05 8
kosolapov@schmitz-soehne.de

Комплексная программа Schmitz

ОРХ мобилис (OPX mobilis®)
Операционные Столы
Для больниц и
амбулаторий Образцовая
гибкость и надёжность



Даймонд (DIAMOND)
Операционные столы
экстра - класса

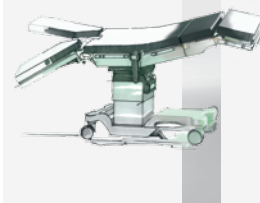


Гинекология,
урология и проктология
Качественное
и необходимое
оборудование




Принадлежности для
операционных столов
Даймонд и ОРХ мобилис
(DIAMOND, OPX mobilis®)



STL 285, STS 282, STX 280
Специальные столы
для транспортировки
пациентов, для экстренных
случаев, амбулаторий,
интенсивной
терапии и
рентгена

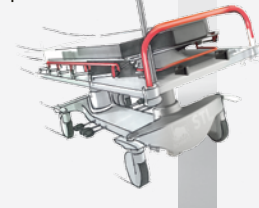

Варимед (varimed®)
Многофункциональные
тележки Наши эксперты в
работе клиник

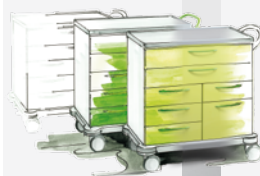

Варимед (varimed®)
Медицинская мебель для
обследования и процедур



Варимед (varimed®)
Мебель в операционные

